


血圧計データ管理ソフトウェア「BPMeter」

ユーザーマニュアル


【BPMeter のインストール】

ダウンロードした BPMsetup

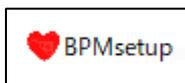


をダブルクリックします。

Windows の設定によっては「Windows によって PC が保護されました」と表示され、インストールができないことがあります。これは BPMSetup に発行元を証明するデジタル署名を付けていないためです。

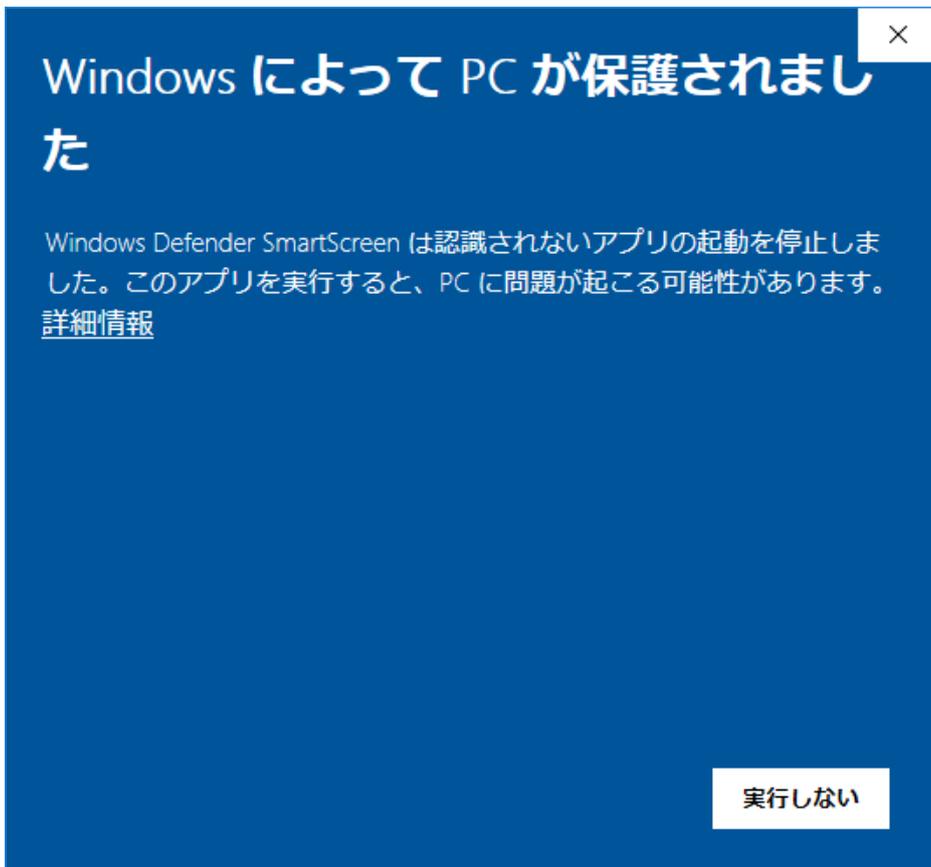


[詳細情報] をクリックすると表示が変わります。


この画面で [実行] をクリックしてください。

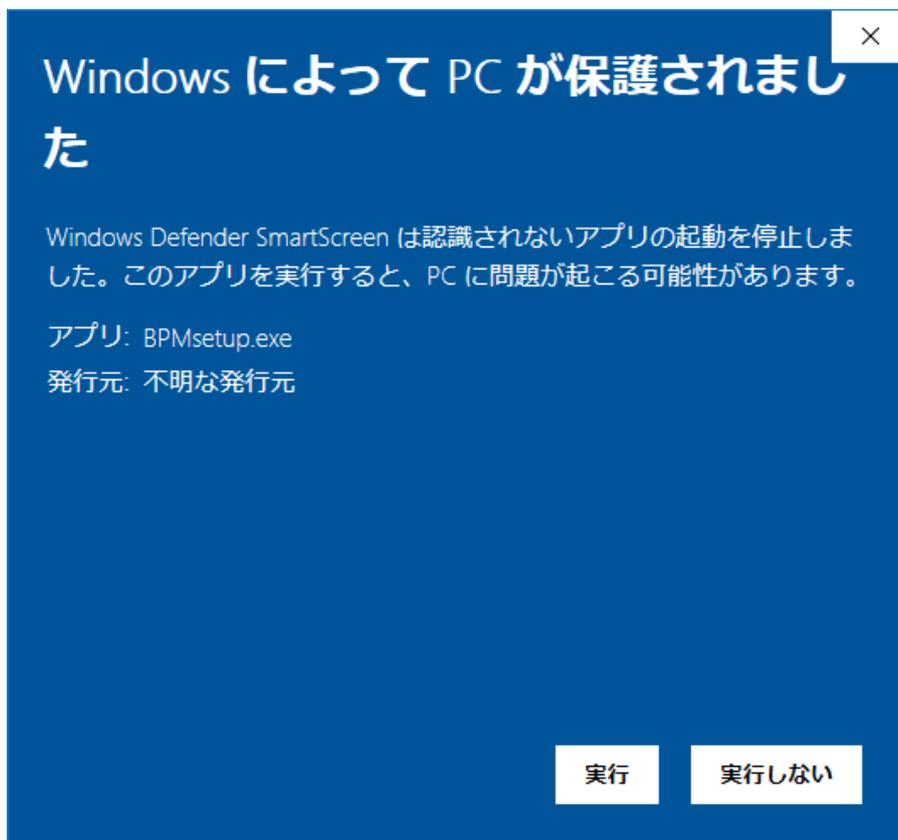


「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」というダイアログボックスが表示されます。 [はい] をクリックします。

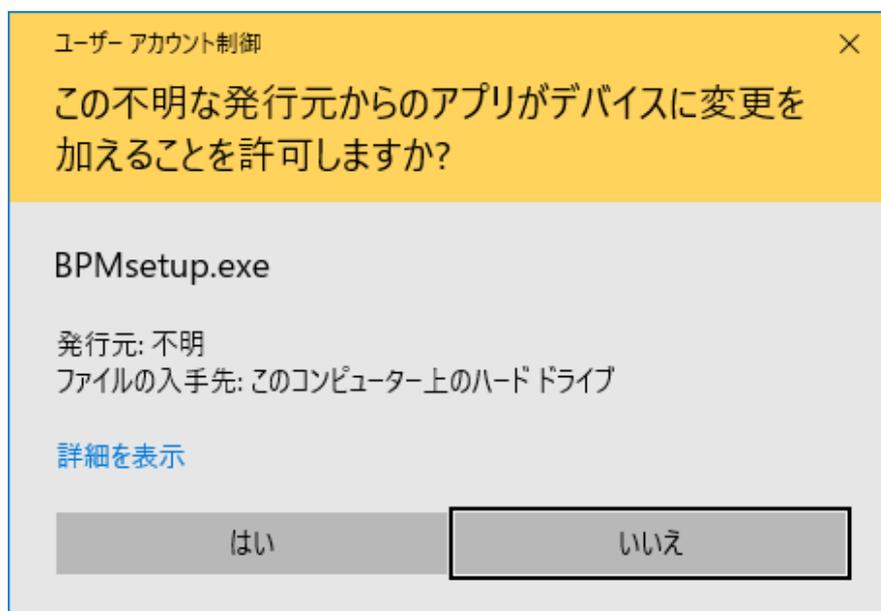


「追加タスクの選択」ダイアログボックスが表示されます。デスクトップ上に BPMeter のアイコンを追加する、スタートアップにショートカットを追加するのであれば、それぞれをチェックしてください。[次へ] をクリックします。

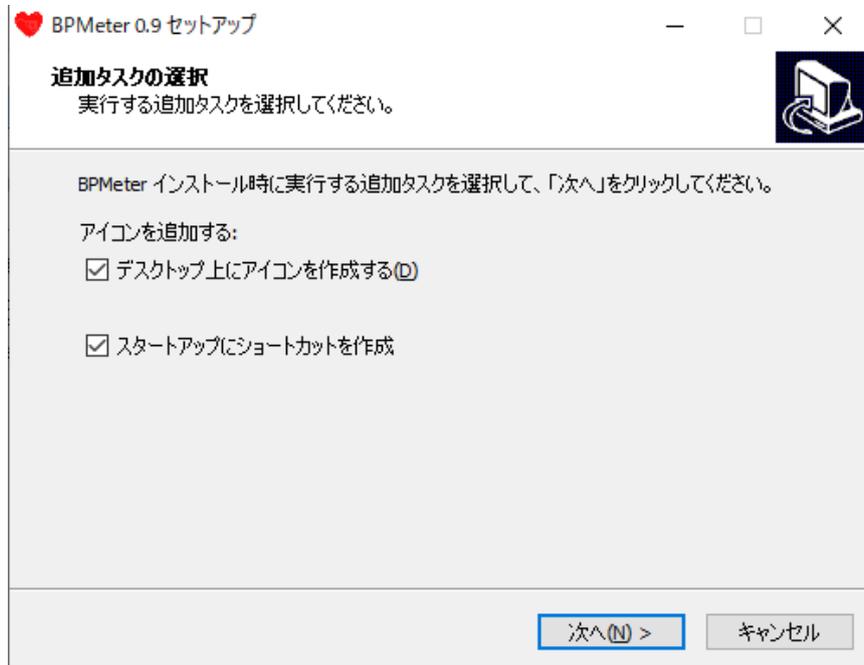

[スタートアップにショートカットを追加する] にを付けた場合、プログラムメニューの指定ダイアログボックスが表示されます。「BPMeter」で良ければ [次へ] ボタンをクリックします。

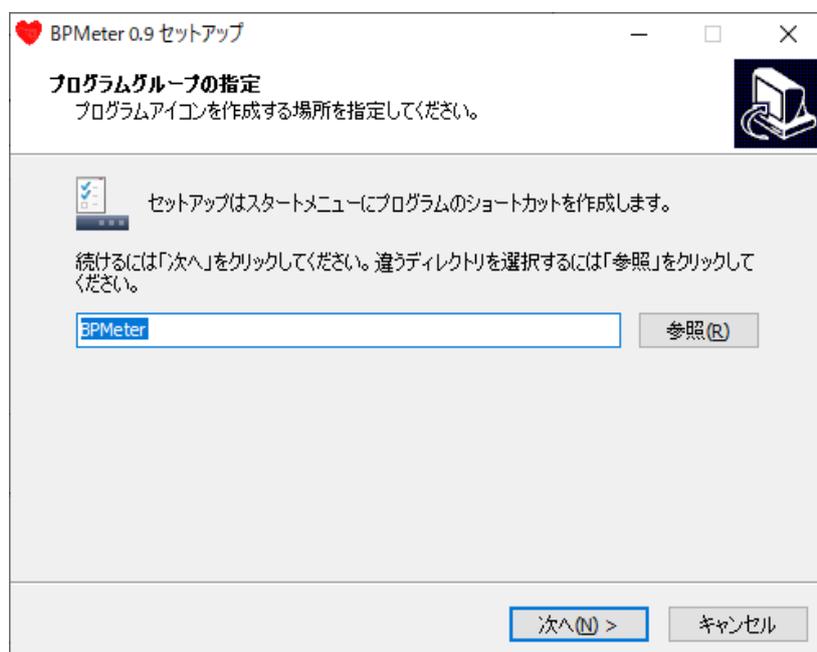

インストールの準備が完了しました。 [インストール] をクリックするとインストールが始まります。

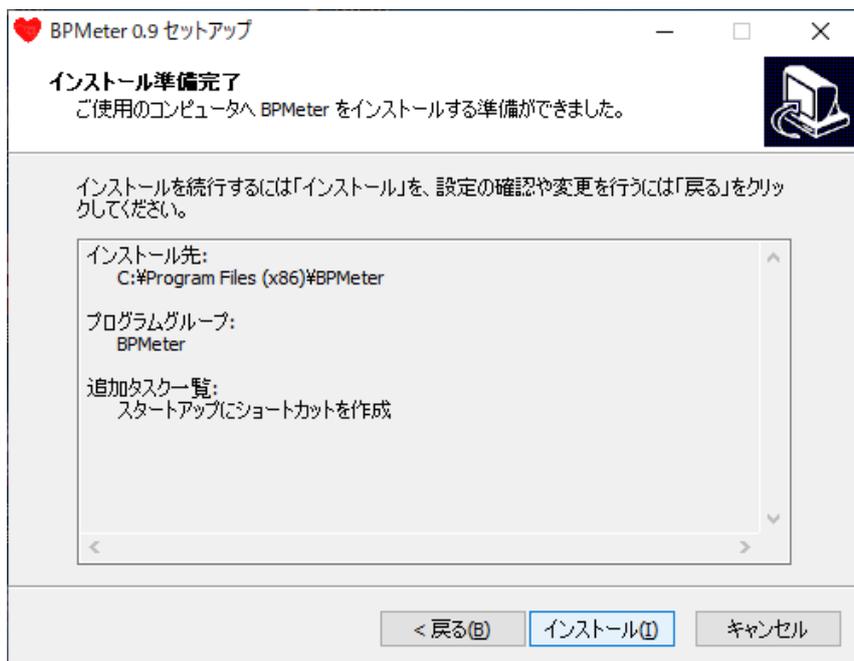



インストールが完了しました。 [BPMeter を実行する] に が付いている状態で [完了] をクリックするとインストーラは閉じ、BPMeter が起動します。起動させたくないときは を外して [完了] をクリックしてください。



【BPMeterの起動】

スタートアップに [BPMeter] グループが作成され、その中に [BPMeter 0.9] と [BPMeterのアンインストール] が登録されました。

[BPMeter 0.9] をクリックすると BPMeter が起動します。

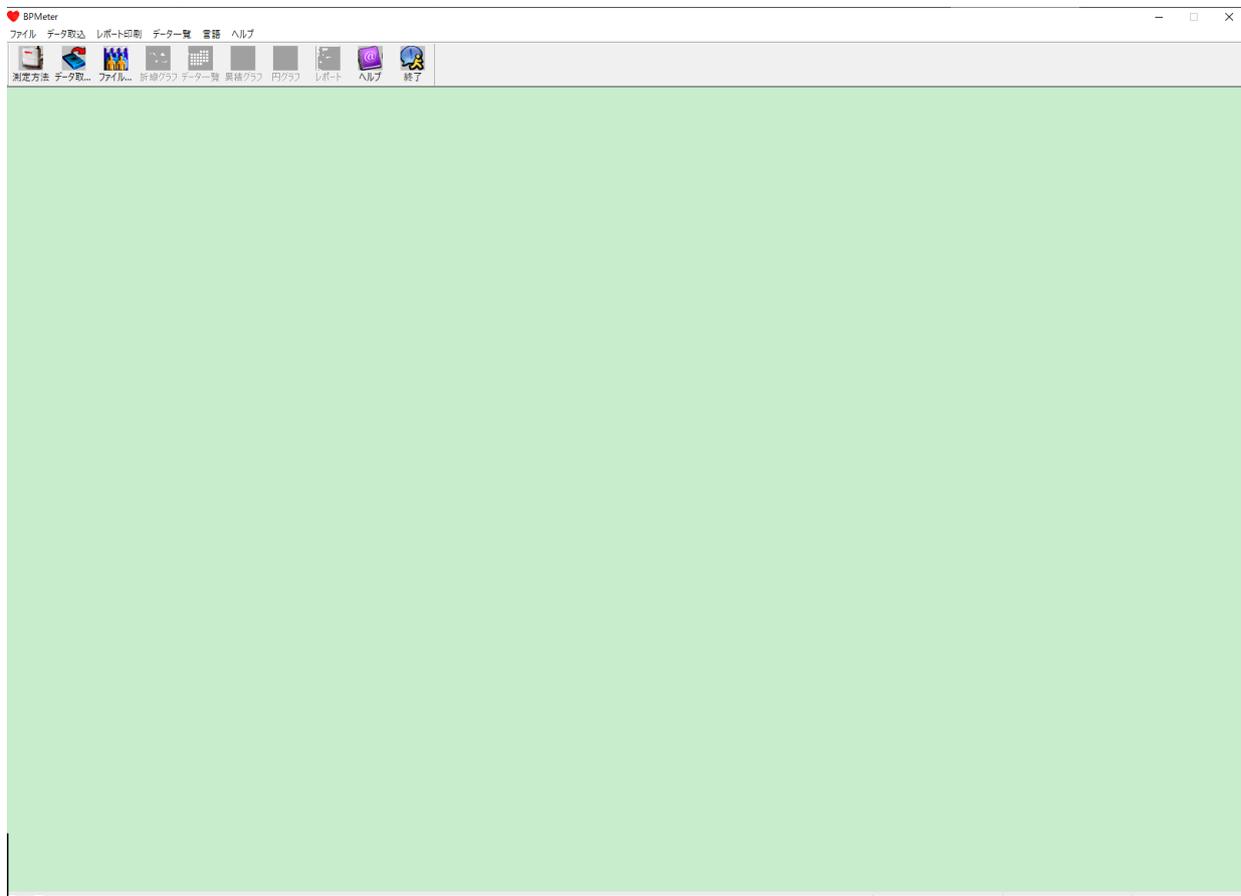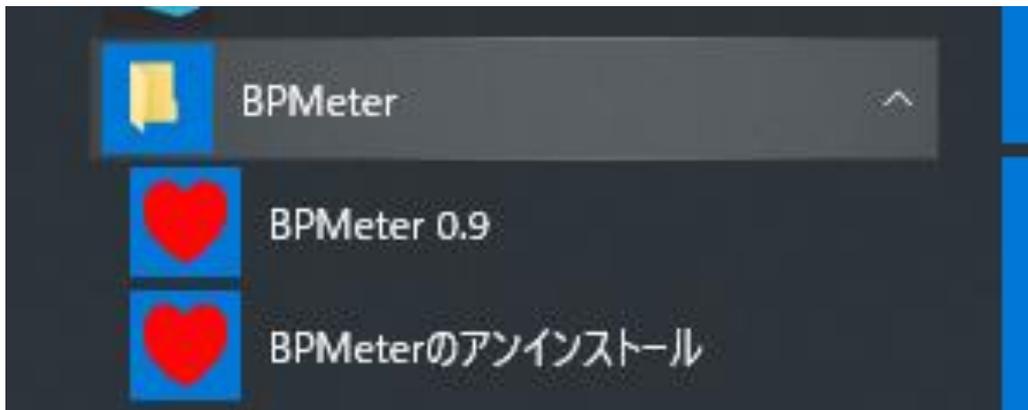

【パソコンと PES-1700 の接続】

パソコンと PES-1700 は USB ケーブルで接続します。PES-1700 側は「ミニ B タイプ」コネクタ、パソコン側はお使いになるパソコンの USB 端子に合ったものを選んでください。

家電店、ホームセンター、100 円均一ショップ、通販などで購入できます。



PES-1700 右側手前のカバーを開けて、USB ミニ B コネクタを挿入します。上下があるので刺さらないときは無理をせず、向きを確認してください。ケーブルの反対側をパソコンの USB 端子に挿入します。

【PES-1700 から測定データを取り込み】

PES-1700 の ON/OFF スイッチを押して電源を入れます。

BPMeter を起動します。


メニューバーの [データ取込] をクリックします。



[パスの設定] をクリックします。




データを保存するフォルダを指定するダイアログボックスが表示されます。標準では BPMeter がインストールされたフォルダの中に「data」フォルダが作成されます。

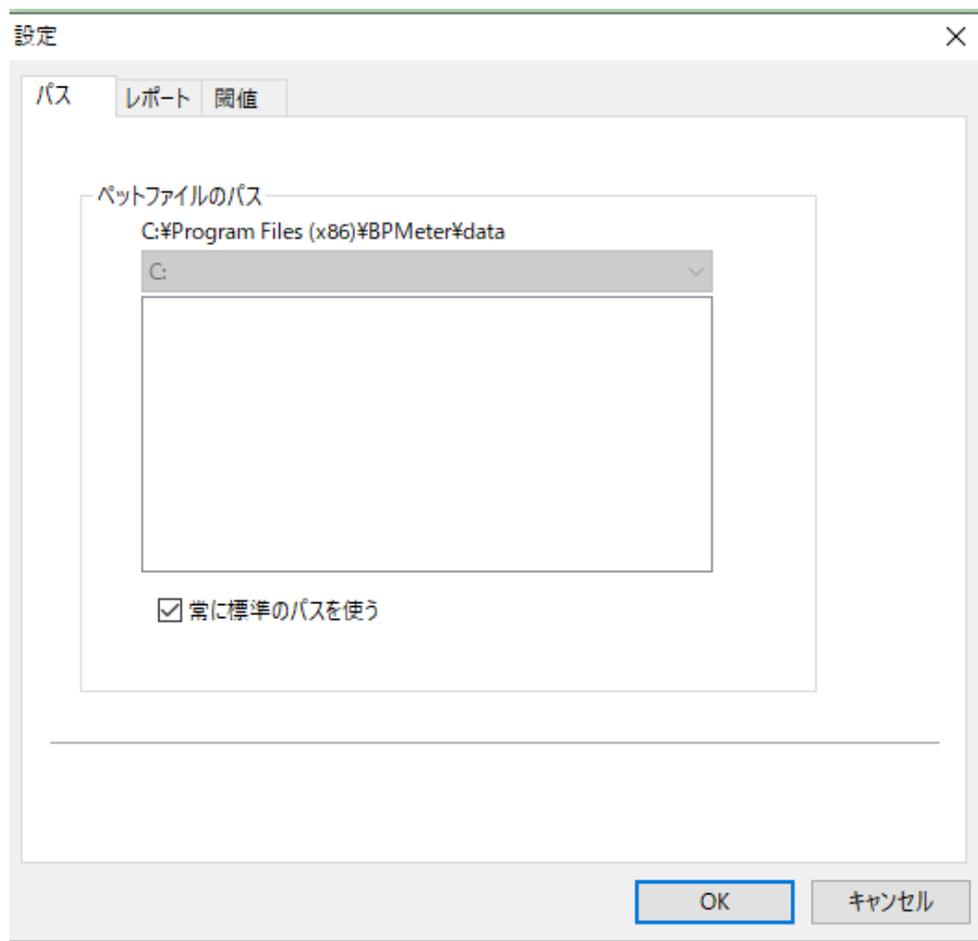


[常に標準のパスを使う] のチェックを外せば、マイドキュメントなど任意のフォルダに保存することができます。

次にデータ取込を行います。


[データ取込] [データ取込実行] をクリックします。

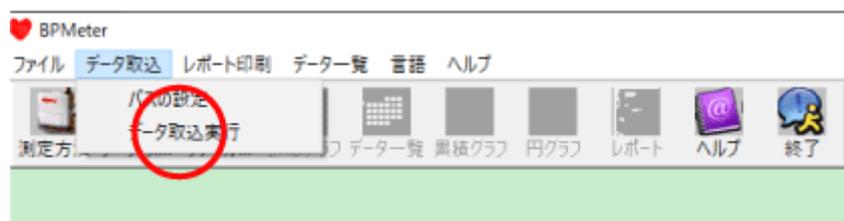


接続方法を選ぶダイアログボックスが表示されます。PES-1700ではUSB接続しか選べないので、USB接続がチェックされていることを確認し、[次回から表示しない]を☑し、[OK]をクリックします。

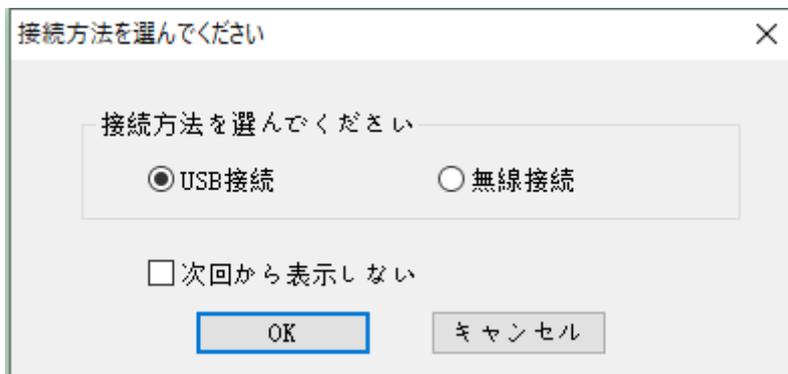

保存するペットの名前を選ぶダイアログボックスが表示されます。最初はプルダウンメニューで [User1] [User2] [User3] [All User] の4つから選ぶことができます。複数飼いの方は、ここでペット名を選ぶことができます。

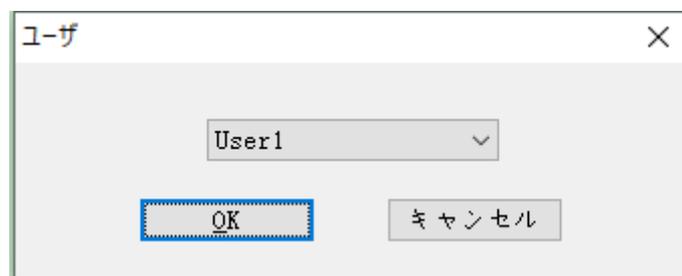

PES-1700 から過去の測定データが取り込まれます。

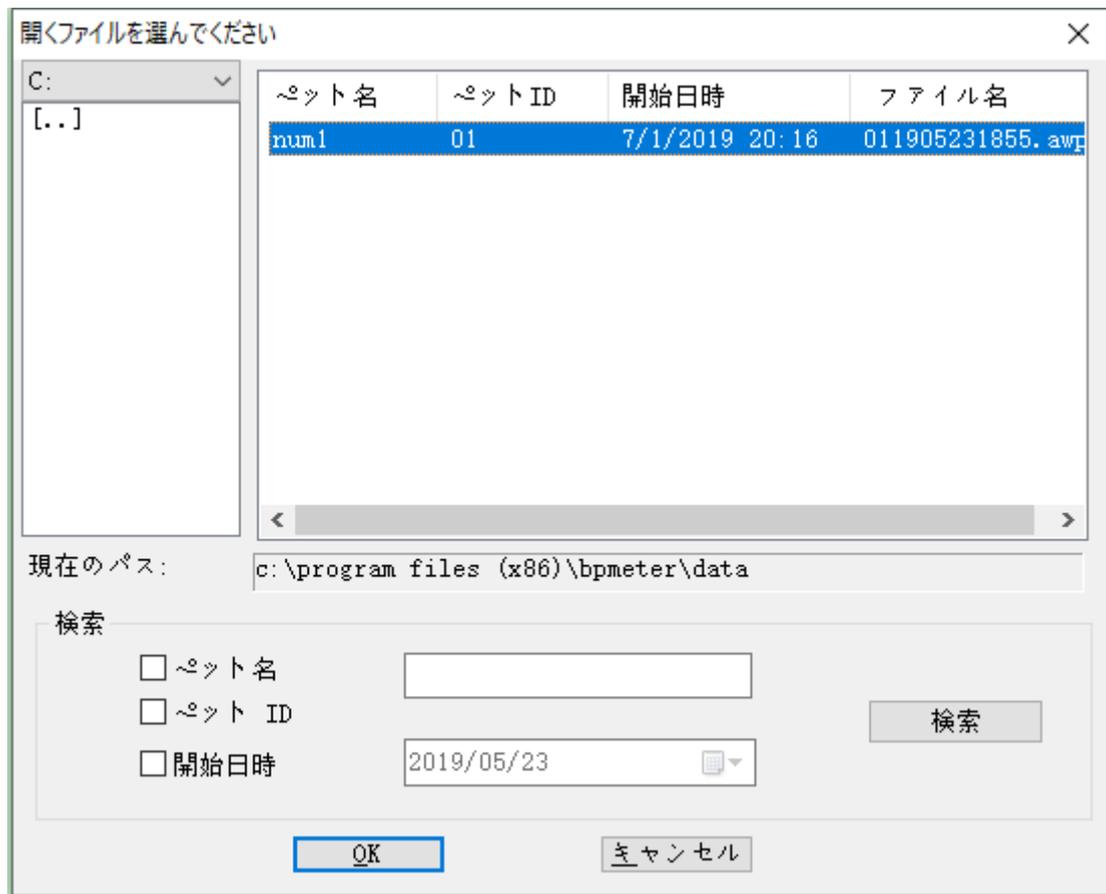


[OK] ボタンをクリックします。過去の測定値が折れ線グラフで表示されます。



最初はペットの名前が「num1」のように自動的に付けられています。ご自分が実際に飼っているペットの名前に変えてみましょう。

メニューバーの [データ一覧] [ペット情報] をクリックします。

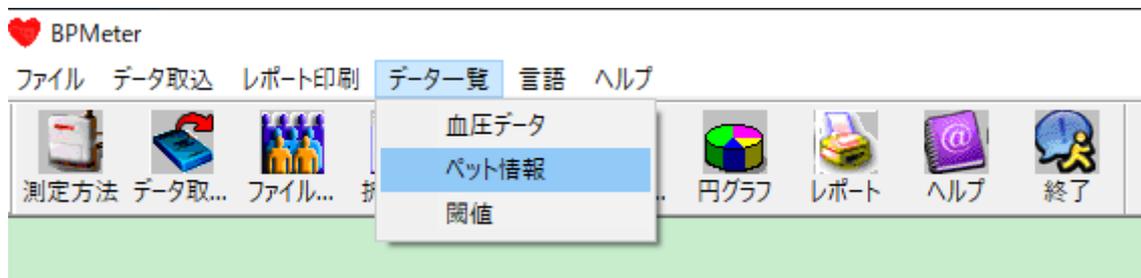

ペット情報設定ダイアログボックスが表示されます。[ペット名] の欄に、ペットの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックします。他の欄はそのままでかまいません。

ペットID	01	年齢	0
ペット名	レオ	性別	雄
住所		身長(cm)	0
		体重(kg)	0
外来番号		種	
Admission No.		生年月日	1899/12/30
Bed No.		電話番号	
Department No.		Email	


アイコンバーの [終了] をクリックし、いったん BPMeter を終了します。



再度 BPMeter を起動し、メニューバーの [ファイル] [開く] をクリックします。



前回取り込んだ User1 のデータが、先ほど設定したペットの名前で表示されます。

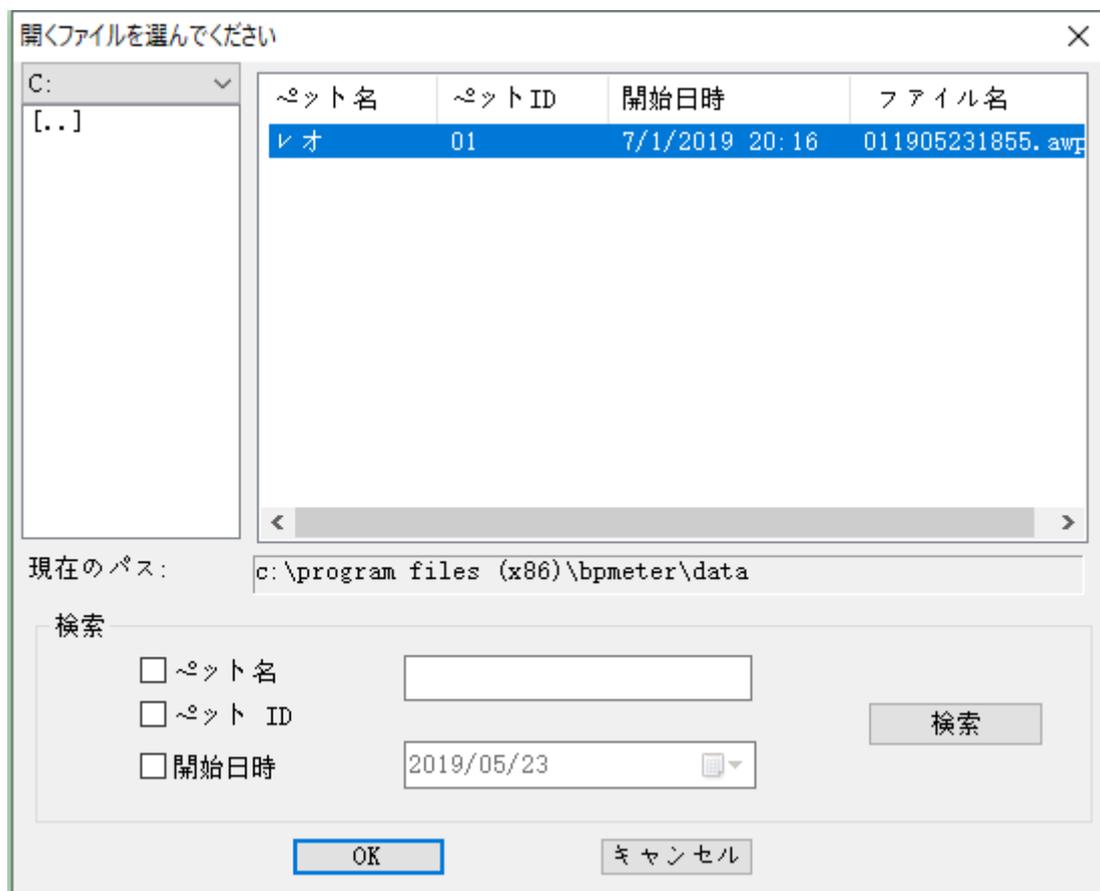

ただし、ここで付けた名前は [データ取込] のユーザ選択ダイアログのプルダウンメニューには反映されません。プルダウンメニューには「User1」「User1」のように表示されます。


アイコンバーの [累積グラフ] [円グラフ] をクリックすると測定結果が累積グラフ、円グラフで表示されます。



【データを書き出す】

血圧データを CSV ファイル形式で書き出すことができます。CSV ファイル形式は多くのアプリケーションで読み込むことができる、汎用的なデータ形式です。Excel に読み込んで細かく分析したり、加工することができます。

データファイルを開いている（画面に血圧グラフが表示されている）状態で、メニューバーの [データ一覧] [血圧データ] をクリックします。

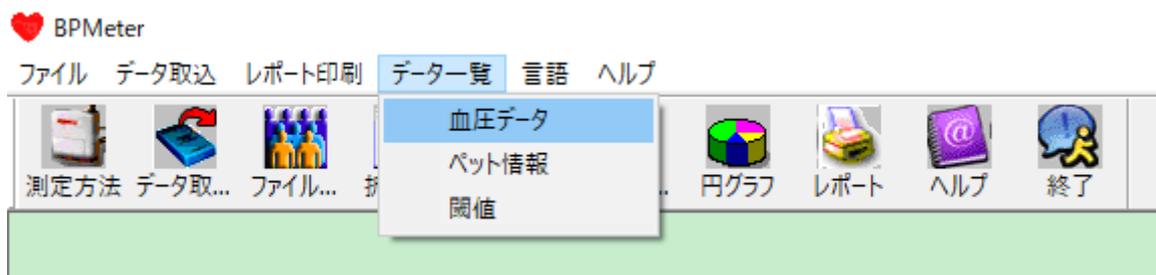


データが一覧表示されます。ここで [別名保存] をクリックします。

*=0/35 (0.0%)	回数	時刻	日付	血圧 (mmHg)	脈拍 (BPM)	平均 (mmHg)	脈圧 (mmHg)	TC	コメント
	1	20:16	07-01-2019	146/89	123	110	57	0	
	2	20:17	07-01-2019	130/72	118	87	58	0	
	3	10:26	09-01-2019	120/73	105	84	47	0	
	4	11:07	09-01-2019	106/80	168	87	26	0	
	5	17:44	09-01-2019	126/87	95	100	39	0	
	6	17:45	09-01-2019	225/89	74	132	136	0	
	7	17:46	09-01-2019	157/82	78	106	75	0	
	8	17:48	09-01-2019	162/96	84	112	66	0	
	9	19:21	09-01-2019	180/108	73	130	72	0	
	10	19:24	09-01-2019	145/94	76	115	51	0	
	11	19:25	09-01-2019	181/119	67	140	62	0	
	12	19:26	09-01-2019	239/117	70	168	122	0	
	13	10:35	10-01-2019	153/97	69	110	56	0	
	14	09:29	11-01-2019	209/114	132	138	95	0	
	15	09:31	11-01-2019	168/75	131	120	93	0	
	16	09:53	11-01-2019	114/86	84	99	28	0	

[名前を付けて保存] ダイアログボックスが表示されます。


ファイルの種類で [All Files(*.CSV)] を選び、希望するファイル名を付けて [保存] をクリック
します。

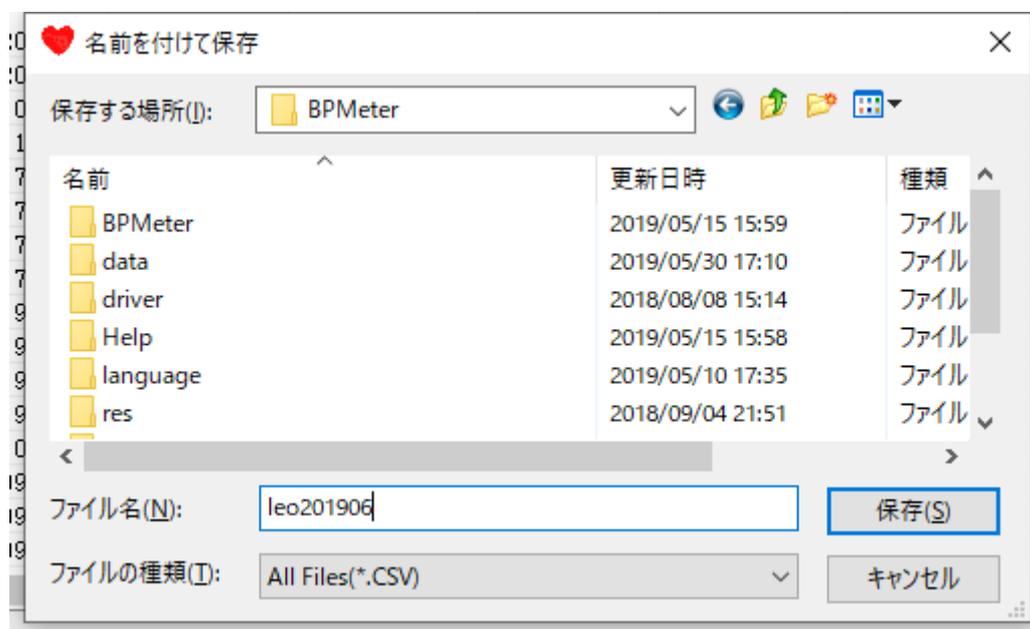


【レポートを作成する】

ペットの血圧測定だけでなく、名前、誕生日、年齢、身長、体重などをレポートにまとめ、印刷することができます。お手元に記録として保存したり、動物病院に資料として持っていくなどに使えます。

メニューバーの [レポート印刷] [レポート] をクリックします。

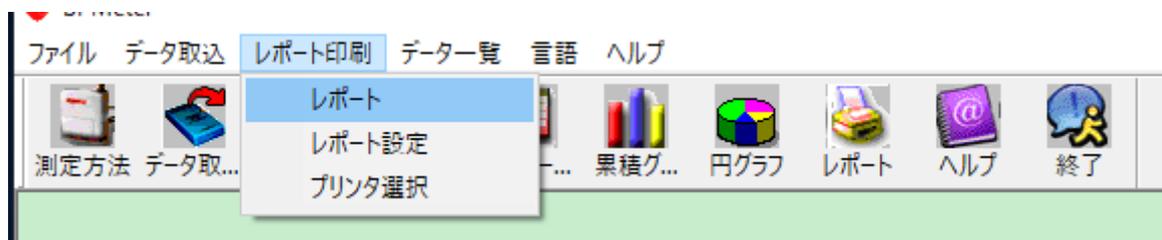


レポートが表示されます。

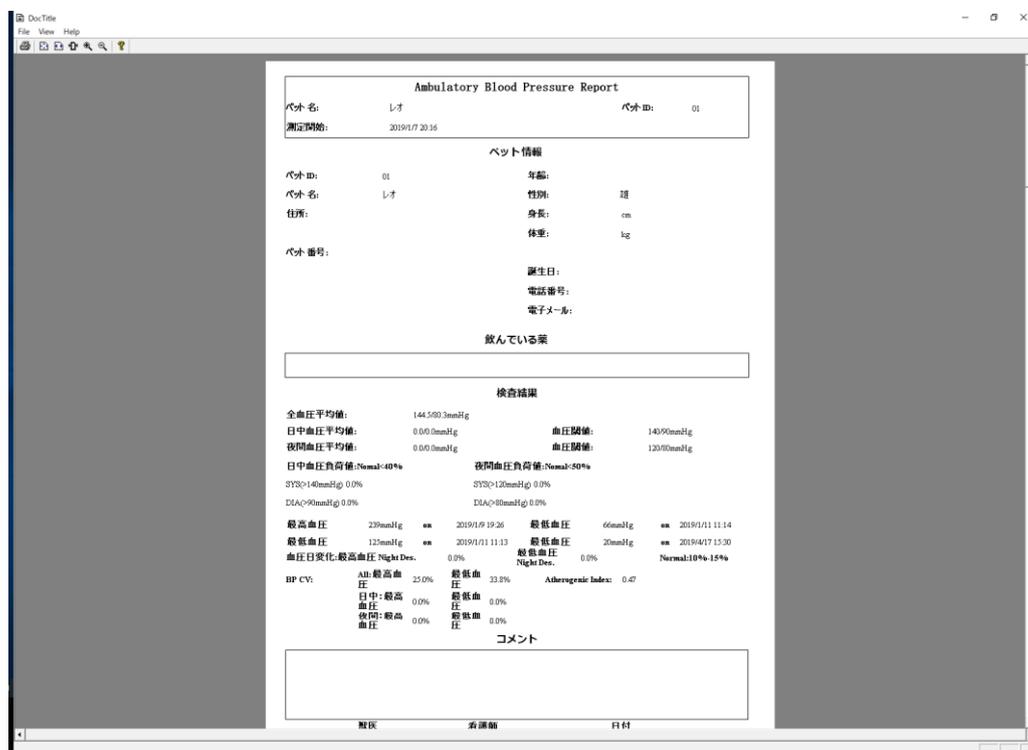


プリンターアイコンをクリックすると、お使いのプリンターで印刷できます。

【使用する言語を変更する】


BPMeter はメニューなどに表示する言語を英語と日本語に設定できます。最初は日本語に設定されています。英語表示にするにはメニューバーの「言語」をクリックします。

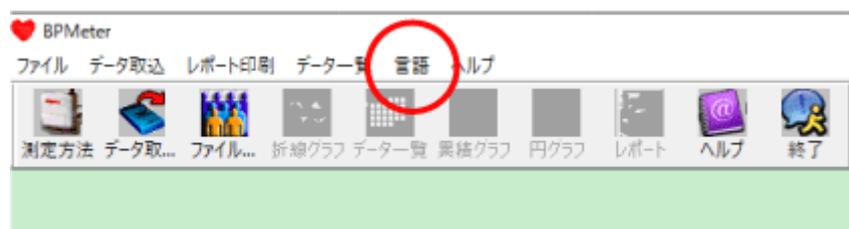

「使用する言語を選んでください」ダイアログボックスが表示されます。プルダウンメニューで「Japanese」（日本語）と「English」（英語）を選ぶことができます。

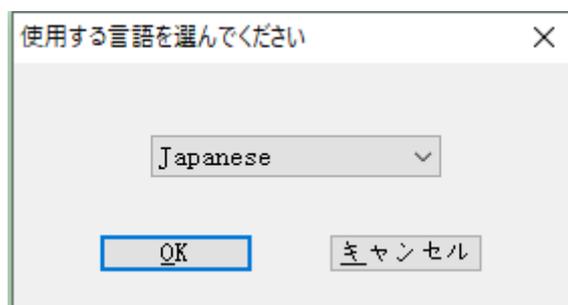

[OK] ボタンをクリックするとメニュー表示が切り替わります。

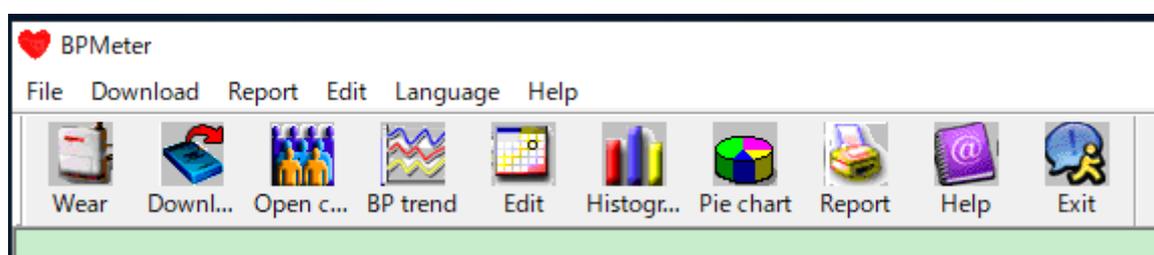

ただし、英語モードで [Help] をクリックしても日本語のヘルプしか表示されません。ご了承ください。


【BPMeter をアンインストールする】

BPMeter をお使いのパソコンからアンインストールするには、次の手順で行います。BPMeter を削除すると、これまでパソコンに保存した測定データもすべて消えてしまう可能性があります。データを残しておくには、事前に別フォルダにコピーしておいてください。


スタートメニューを開き、[BPMeter] [BPMeter のアンインストール] をクリックします。



[この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?] と表示されるので、[はい] をクリックします。

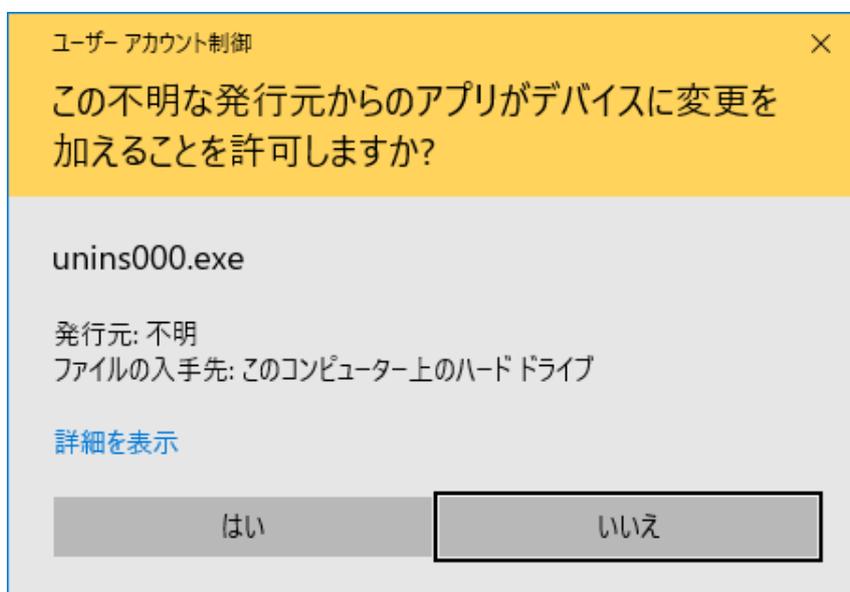

[BPMeter とその関連コンポーネントをすべて削除します。よろしいですか?] と確認してきます。 [はい] をクリックします。

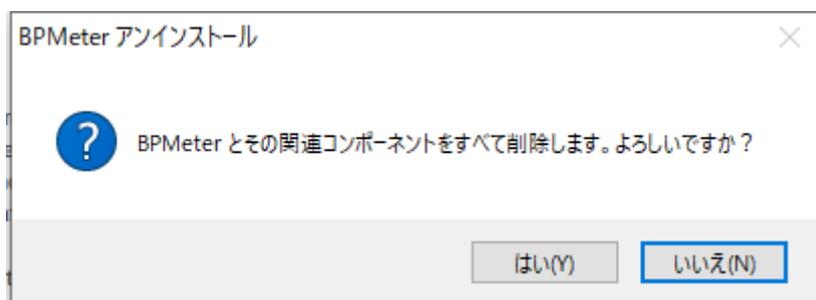

BPMeter は削除されました。

